

## 検査材料の採取・送付に関する追加情報

平成 15 年 4 月 9 日

検査材料を国立感染症研究所に輸送するに当たっては、感染症情報センターの検体送付に関する[ウェブサイト](#)及びその中の pdf ファイルを参照してください。

ここに記載されているように最終的な送付日、送付方法に関しては感染研ウイルス 3 部第 1 室と相談してください。

検体採取に関して、採取した血液は分離し、血清として滅菌セラムチューブに移して送付してください。その他の検体も無菌的に採取し、滅菌された容器に入れて送付してください。

また、検体送付に関する 3 重容器に関する問い合わせがありましたが、最寄りの業者から購入するなどの対応をお願いします。

最寄りの業者に関しては以下の会社などで確認してください。

取り扱い会社例：

### [家田貿易株式会社](#)

東京都文京区本郷 3-14-16 電話 03-3816-2861 FAX 03-3814-5347  
e-mail [boeki@ieda-group.co.jp](mailto:boeki@ieda-group.co.jp)

大阪府吹田市南田中 1-14-5 電話 06-6338-1518 FAX 06-6338-5626

### [住友ベークライト株式会社](#)

本社 医療機器事業部 理化学器具営業部  
東京都品川区東品川 2-5-8 電話 03-5462-4831 FAX 03-5462-4894

## STP-100,STP-300

セフトパック STP-100 の構成は圧力の耐久性に優れたポリプロピレン製 1.25 リットル容器、吸収剤、エアーパーキン、プロテクティブコイル、説明書、ラベル、出荷人申告書、ダンボールからなっています。

またポリプロピレン製の内容器はオートクレーブ可能です。

さらにセフトパック 100 を冷却して輸送する場合は特別にデザインされたセフトパック 300 をご使用ください。



STP-100



STP-300

### STP-100, STP-300

メーカーコード 386

カタログNO.	品名	入り数	価格
STP-100	セイフトバック100	12個/ケース	<b>92,400</b>
STP-100S	セイフトバック100S	1個	<b>10,000</b>
STP-300	セイフトバック300	4個/ケース	<b>80,000</b>

### セラムメーリングボックス

内側のフタ付きアルミニウム缶はオートクレーブが可能です。

(121、20分)



品番	規格	材質	包装	参考価格(円)	
				単価	ケース価格
MS-99120	二重缶構成	外側缶:紙 内側缶:アルミニウム	6/ケース	3,200	19,200